


Unident® Impre

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi


Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.

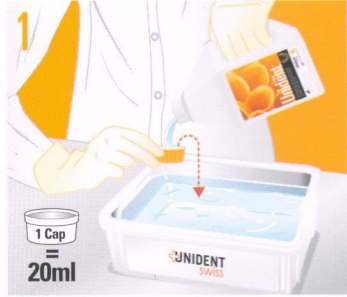

Unident® Impre'yi ıslatma tankında %10 oranında seyreltin (her 1 litre su için 100ml)



Ölçüleri solüsyona batırın ve 15 dk. bekletin.

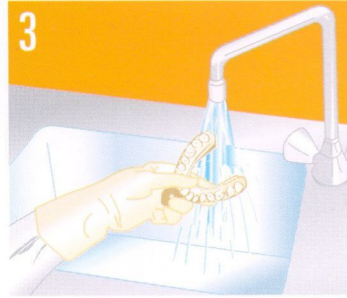

Ölçüleri solüsyondan çıkarın ve akan suyun altında iyice durulayın.



Tek kullanımlık kâğıt havlu ile derhal kurulayın.


Önlemler

Tehlikelidir - Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIb Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

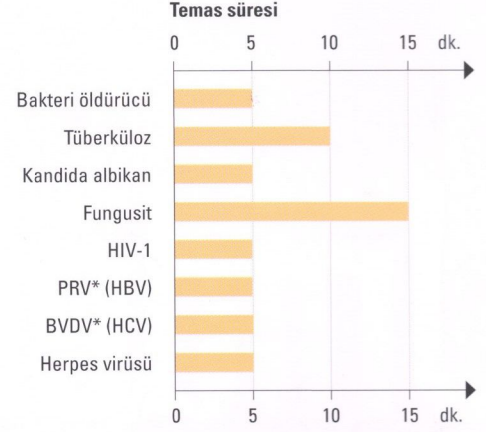

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla Uyumludur

Bakteri öldürücü:	EN 1040, EN 13727, EN 14561
Tüberküloz öldürücü:	EN 14348 (60 dk.), prEN 14563
Yestisit:	EN 1275, EN 13624
Mantar öldürücü:	EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün bileşenleri

100gr Unident® Impre 2.75gr N-alkil-N- benzil-N klorür, N-dimetilamonyum ve 5gr glutaraldehid içerir.

Fiziksel veri

Renk:	Renksiz
pH değeri:	2.5 (konsantre)
Raf Ömrü:	Konsantre 3 yıl
	Seyreltilmiş 7 gün en fazla*
Konteyner:	Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

*Kir miktarına bağlıdır.

Ambalaj Bilgisi

1kg	1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
	✓		

Aksesuarlar

3 Lt.lik ıslatma tankı (INTANK)

