

Unident® Impre 10

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi


Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Unident® Impre 10'u ıslatma tankında %2 oranında seyreltin (2.5 litre soğuk veya ılık suya 50gr). Paketteki ölçü kaşığı kullanın. (2 x 25gr'lık kaşık). Tozun tamamen çözünmesine müsaade edin.



Ölçüleri solüsyona batırın ve 10 dk. bekletin.

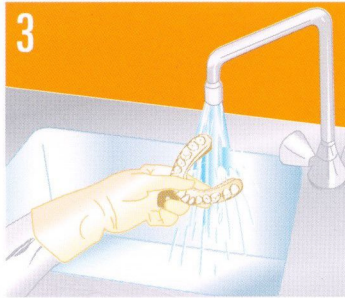

Ölçüleri solüsyondan çıkarın ve akan suyun altında iyice durulayın.



Tek kullanımlık kâğıt havlu ile derhal kurulayın.


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +30°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIb Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

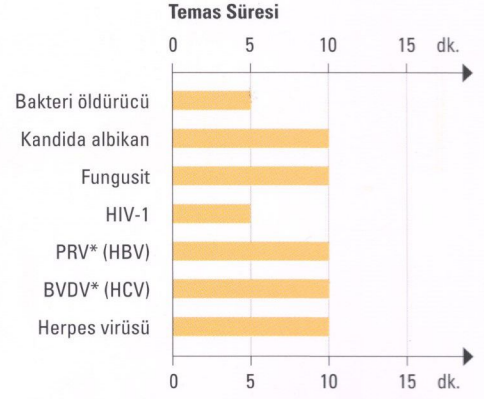

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla Uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Tüberküloz öldürücü: EN 14563 (60 dk.)

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Fungusit: EN 14562

Ürün bileşenleri

Toz, pentapotasyum iki(peroksi mono sülfat) iki(sülfat), iyonik olmayan ve anyonik maddeler, bağlayıcı ve asitleştirici ajanlar içerir. Tozun su ile seyreltilmesinden sonra aktif oksijen salgılar.

Fiziksel Veri

Renk: Beyaz Toz

Raf Ömrü: Konsantre 2 yıl

Kullanılmamış seyrelti 1 gün

Kullanılmış seyrelti 1 gün

Konteyner: Geri dönüşümlü PP malzemeden üretilmiştir

Ambalaj Bilgisi

| 1kg | 1 Lt | 2,5 Lt | 5 Lt |
|-----|------|--------|------|
| ✓ | | | |

Aksesuarlar

3 Lt.lik Islatma tankı (INTANK)

