

Dermocol®

El hijyen ürünlerinin doğru kullanımı, hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına yönelik güvenlik ve koruma kalitesi belirtisidir. Dermocol, cildin doğal pH değerine uyarken kusursuz el hijyenine yönelik koruma ve solüsyon sağlayan eksiksiz el bakımı ürün grubudur.



Dermocol® Wash

Bir el dezenfektanı kullanımdan önce, sık kullanımlara yönelik, sabun içermeyen, el losyonudur.

Dermocol® New Colourless

Nebusid ile kullanıma yönelik, Etanol içerikli, likit, el solüsyonudur.

Dermocol® Gel New

Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonuna yönelik, alkol içerikli, jelidir. Nemlendirici ve yumuşatıcı içerir.

YENİ! Dermocol® Silk

Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonuna yönelik, alkol içerikli, jelidir. Nemlendirici ve yumuşatıcı içerir.

	Dermocol® Wash	Dermocol® New Colourless	Dermocol® Gel New	YENİ! Dermocol® Silk
Ana Özellikler	Hassas ciltler için doğal pH	Mükemmel cilt toleransı	Mükemmel cilt toleransı	Mükemmel cilt toleransı
Hassas ciltlere uygunluk	✓	✓	✓	✓
Kullanıma hazır	✓	✓	✓	✓
Temas Süresi		30 sn.	30 sn.	30 sn.
VAH/DGHH sertifikası		✓		
Koku	Hafif kokulu	Hafif kokulu	Hafif kokulu	Taze badem
Etkinlik				
Bakterisit		✓ MRSA dahil	✓ MRSA dahil	✓ MRSA dahil
Tüberküloz		✓	✓	✓
Kandida albican		✓	✓	✓
HIV-1		✓	✓	✓
PRV (HBV taşıyıcı)		✓	✓	✓
BVDV (HCV taşıyıcı)		✓	✓	✓
Herpes virüsü		✓	✓	✓
Rotavirüs		✓	✓	✓
Norovirüs		✓	✓	✓
Influenza virüsü H1N1		✓	✓	✓
Poliovirüs		✓	✓	✓
Adenovirüs		✓	✓	✓
Koronavirüs (SARS taşıyıcı)		✓	✓	✓
Ambalaj biçimi	500 ml.lik şişe 1Lt Havasız şişe 5Lt	5Lt	500 ml.lik şişe 1Lt Havasız şişe	500 ml.lik şişe

Dermocol® Dispensers

Dermocol® duvar aparatı Dermocol® 1Lt havasız şişe ile kullanılmak üzere ABS plastikten üretilmiştir ve oldukça hafiftir.

- ✓ Kurulumu kolaydır
- ✓ Halka açık alanlarda kilitletilmiş sistem uygulanabilir
- ✓ Kullanımı basittir
- ✓ Ekonomiktir
- ✓ Damlatma tepsisi tercihe bağlıdır

Manuel

- ✓ 120 x 300 x 110 mm ebatlarındadır

Otomatik

- ✓ 40 x 316 x 115 mm ebatlarındadır.
- ✓ Dokunmadan çalışma
- ✓ 3.6 veya 9 ml doz ayarı
- ✓ Pil veya elektrikle kullanım



(Otomatik)

Dermocol® Protect

Pudrasız nitrilden üretilmiş muayene eldiveni.

- ✓ Lateks içermeyen
- ✓ Üstün kavrama ve dokunma hassasiyeti
- ✓ Ekstra genişleme, ekstra yumuşak formülasyon
- ✓ Parmak dokusu
- ✓ Renk: beyaz
- ✓ EN 374 ve EN 420 Avrupa Standartları ile uyumlu
- ✓ Ebatlar XS, S, M, L
- ✓ 100 adetlik kutu



Dermocol®

Gel New



Hijyenik ve cerrahi el
dezenfeksiyonuna yönelik jel.



Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonuna yönelik kullanıma hazır hidro alkollü tikzotrofik jeldir. Dermocol® Gel New iki hasta arası kullanımlarda ideal olan hızlı bir etkiye sahiptir. Elinizi nemlendiren ve cildinizin doğal pH değerlerini koruyan, koruyucu maddeler içerir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlı bir jeldir
- Temas süresi: 30 saniyedir (hijyenik kullanımda)
- Hafif parfümlüdür
- Yapışkan olmayan formüle sahiptir
- Sık kullanımlar için idealdir
- Cilt dostudur – kurumayı önler
- Mükemmel etkinlik spektrumuna sahiptir
- 500ml'lik pompalı şişe ve 1Lt. havasız şişelerde mevcuttur



UNIDENT S.A Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hasta güvenliği için el hijyeni kampanyasının gelişmesini desteklemektedir.
www.who.int/gpsc/pops/en



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Dermocol® Gel New

Kullanma talimatı

Hijyenik el dezenfeksiyonu (EN 1500): 3 ml – 30 saniye.

Cerrahi el dezenfeksiyonu (EN 12791): 2 x 3 ml – 2 x 45 saniye.

Kullanım öncesi

Takılarınızı çıkartın, görünür bir kir var ise ellerinizi

Dermocol® Wash ile yıkayın ve iyice kurulayın.



Avucunuza 3ml* Dermocol® Gel New uygulayın.
(*3ml = pompaya 2 defa basın)



Avuç içlerinizi birbirlerine sürtün.



Sağ avucunuzu sol elinizin üzerine ve sol avucunuzu sağ elinizin üzerine sürtün.



Parmaklarınızı kenetleyerek avuç içini birbirine sürtün.



Parmak uçlarınıza özen göstererek parmaklarınızın arkasını diğer avucunuzun içinde birbirine kenetleyerek sürtün.



Sol avuç içinde sağ el başparmağınızı kavrayarak çevirin, aynı işlemi diğer elinize de uygulayın.



Sol elinizin parmak uçlarını sol avuç içinde dairesel ve ileri-geri olarak sürtün aynı işlemi diğer elinize de uygulayın.



Sol elinizin avuç içi ile sağ el bileğinizi dairesel hareketlerle ovalayın, aynı işlemi diğer elinizle de yapın.

Önlemler

Tehlikelidir - kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur). Biyositleri dikkatli kullanınız. Her kullanım öncesi, etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz. +5°C ila +25°C arasında muhafaza ediniz. Kişisel hijyen için (Group 1 – PT1) biyosidal üründür.

Fiziksel veri

Renk: Açık mavi
Koku: Hafif kokulu
pH değeri: 5.5
Raf ömrü: 3 yıl
Konteyner: Geri dönüşümlü PE malzemeden üretilmiştir.




ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Etkinlik

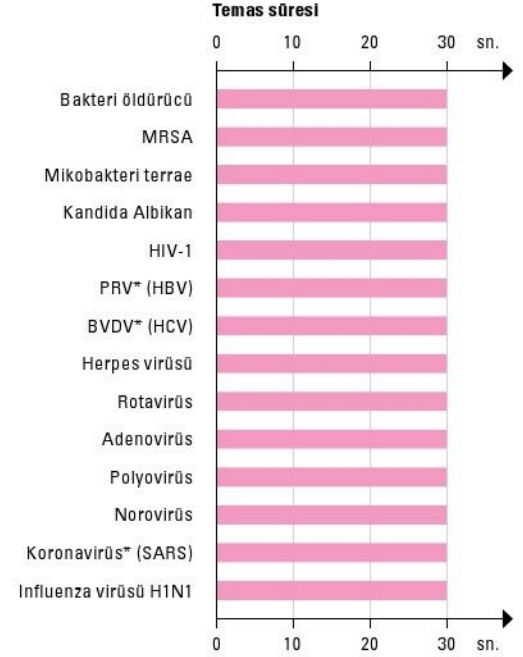

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

* Koronavirüs: SARS yerine kullanılır

Avrupa standartlarıyla uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 13727, EN 1500, EN 12791

Tüberküloz öldürücü: EN 14348

Mantar öldürücü: EN 1650

Virüs öldürücü: EN 14476+A1 (30 sn.)

Ürün bileşenleri

100ml Dermocol® Gel New 75.5ml etanol (CAS No 64-17-5), kıvam koyulaştırıcı, nemlendirici, yumuşatıcı ajanlar, renklendirici ve su içerir.

Ambalaj Bilgileri

500ml	1Lt Havasız şişe	5Lt
✓	✓	

Aksesuarlar

Havasız 1 Lt. lik şişe için duvara monte uygulama haznesi.

Dermocol[®] Silk



Cerrahi ve hijyenik el dezenfeksiyonuna yönelik jel



Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonuna yönelik kullanıma hazır hidro alkollü tikzotrofik jeldir. Dermocol[®] Silk, iki hasta arası kullanımlarda ideal olan hızlı bir etkiye sahiptir. Elinizi nemlendiren ve cildinizin doğal pH değerini koruyan koruyucu maddeler içerir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlı bir jeldir
- Temas süresi: 30 saniyedir (hijyenik kullanımda)
- Yapışkan olmayan bir formüle sahiptir
- Sık kullanıma uygundur
- Cilt dostudur – kurumayı önler
- Taze badem kokuludur
- Mükemmel etkinlik spektrumuna sahiptir
- 500ml'lik şişelerde mevcuttur



UNIDENT S.A Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun hasta güvenliği için el hijyeni kampanyasının gelişmesini desteklemektedir.
www.who.int/gpsc/pops/en



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Dermocol® Silk

Kullanma talimatı

Hijyenik el dezenfeksiyonu (EN 1500): 3 ml – 30 saniye.

Cerrahi el dezenfeksiyonu (EN 12791): 2 x 3 ml – 2 x 45 saniye.

Kullanım öncesi

Takılarınızı çıkartın, görünür bir kir var ise ellerinizi Dermocol® Wash ile yıkayın ve iyice kurutun.



1 Avucunuza 3ml* Dermocol® Silk uygulayın. (*3ml = pompaya 2 defa basılır)



2 Avuçlarınızı birbirine sürtün.



3 Sağ avucunuzu sol elinizin üzerine ve sol avucunuzu sağ elinizin üzerine sürtün.



4 Parmaklarınızı kenetleyerek avuç içlerinizi birbirine sürtün.



5 Parmak uçlarınıza özen göstererek parmaklarınızın arkasını diğer avucunuzun içinde birbirine kenetleyerek sürtün.



6 Sol avuç içinde sağ el başparmağınızı kavrayarak çevirin, aynı işlemi diğer elinize de uygulayın.



7 Sağ elinizin parmak uçlarını sol avuç içinde dairesel ve ileri-geri olarak sürtün aynı işlemi diğer elinizle de tekrar edin.



8 Sol elinizin avuç içi ile sağ el bileğinizi dairesel hareketlerle ovalayın, aynı işlemi diğer elinizle de tekrar edin.


Önlemler

Tehlikelidir - kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur). Biyositleri dikkatli kullanınız. Her kullanım öncesi, etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz. +5°C ila +25°C arasında muhafaza ediniz. İnsan hijyeni için (Group 1 – PT1) biyosidal üründür.

Fiziksel veri

Renk: Renksiz
Koku: Taze Badem
pH değeri: 5.5
Raf ömrü: 3 yıl
Konteyner: Geri dönüşümlü PE malzemeden üretilmiştir

Etkinlik

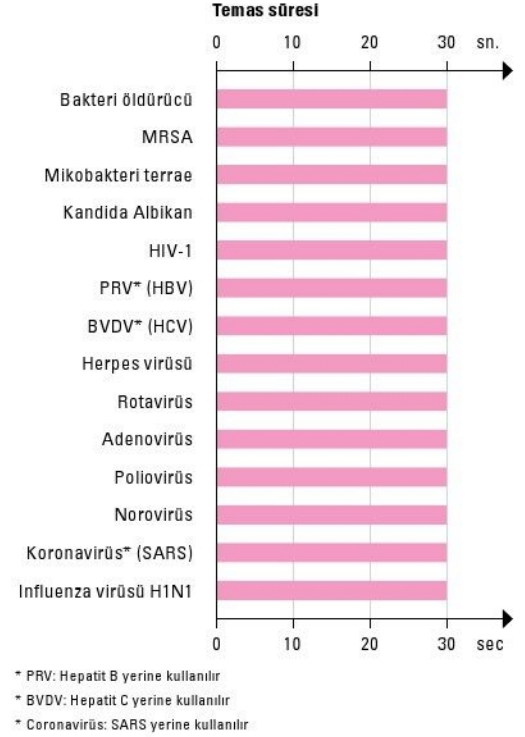

Avrupa standartlarıyla uyumlu

Bakteri öldürücü: EN 13727, EN 1500, EN 12791

Tüberküloz: EN 14348

Mantar öldürücü: EN 1650

Virüs öldürücü: EN 14476+A1 (30 sn.)

Ürün bileşenleri

100ml. Dermocol® Silk 75.5ml. etanol (CAS No 64-17-5), kıvam koyulaştırıcı, nemlendirici, yumuşatıcı ajanlar, parfüm ve su içerir.

Paketleme

500ml	1 1lt havası alınmış şişe	5L
✓		



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

New Colourless[®] Dermocol



Hijyenik dezenfeksiyon ve cerrahi el dezenfeksiyonu için sıvı



Hijyenik dezenfeksiyon ve cerrahi el dezenfeksiyonu için kullanıma hazır sıvıdır. Dermocol[®] New Colourless hızlı etkisiyle, iki hasta arasında kullanım için idealdir. İçerdiği koruyucu maddeler ile elinizi nemlendirir ve cildinizin doğal pH değerlerini korur.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlıdır
- Temas süresi: 30 saniyedir. (hijyenik kullanımda)
- Cilt dostudur – kurumayı önler
- Hafif kokuludur
- Yapışkan olmayan formüle sahiptir
- Mükemmel etkinlik spektrumuna sahiptir
- Nebucid[®] Dermocol[®] Newneb “sensörlü” el dezenfeksiyon sistemleri ile kullanıma uygundur



UNIDENT S.A Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun hasta güvenliği için el hijyeni kampanyasının gelişmesini desteklemektedir.
www.who.int/gpsc/pops/en



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

New Colourless[®] Dermocol

Kullanma talimatı

Hijyenik el dezenfeksiyonu (EN 1500): 3 ml – 30 sn.

Cerrahi el dezenfeksiyonu (EN 12791): 2 x 3 ml – 2 x 45 sn.

Ürün bileşenleri

100ml Dermocol[®] New Colourless 76.1ml etanol (CAS No 64-17-5), nemlendirici ve yumuşatıcı ajanlar, parfüm ve su içerir.

Fiziksel veri

Renk: Renksiz

Koku: Hafif Kokulu

pH değeri: 5.5

Raf ömrü: 3 yıl

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Önlemler

Tehlikelidir - Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur). Biyositleri dikkatli kullanınız.


Her kullanım öncesi, etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz. +5°C ila +25°C arasında muhafaza ediniz.

Kişisel hijyen için (Grup 1 – PT1) biyosidal ürün.

Ambalaj B ilgileri

500ml	1 Lt havası alınmış şişe	5 Lt
✓		✓

Etkinlik

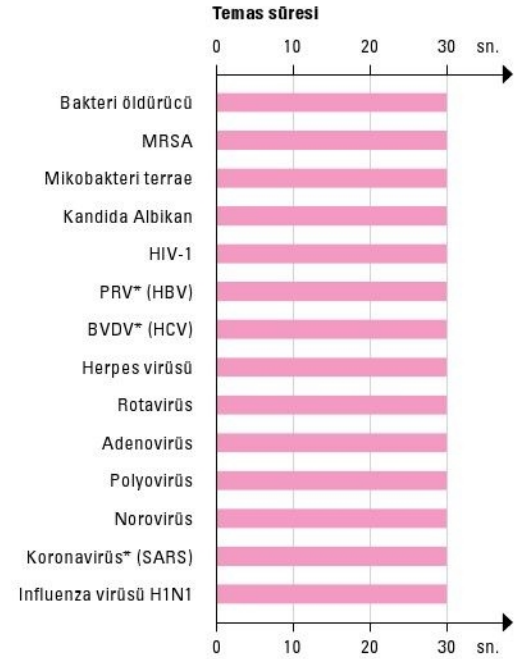

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

* Koronavirüs: SARS yerine kullanılır

Avrupa standartlarıyla uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, prEN 12054, EN 1500, EN 12791

Tüberküloz: EN 14348

Mantar öldürücü: EN 1650

Virüs öldürücü: EN 14476+A1 (30 sn.)



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Dermocol® Wash



Sabun içermeyen el yıkama losyonu.



Alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanımından önce sık yıkanan eller için formüle edilmiştir.
Dermocol® Wash doğal pH değerindedir ve hassas ciltler için idealdir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Doğal pH değerindedir
- Sabun içermez
- Cildi suyun kurutucu etkisine karşı koruyan yumuşatıcılar içerir
- Hafif kokuludur
- Cilt ile uyumu mükemmeldir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Dermocol® Wash

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Takılarınızı çıkartın.



1 Ellerinizi akan suyun altında ıslatın.



2 Avucunuza tek doz Dermocol® Wash sıkın.



3 Parmak aralarınıza özen göstererek ellerinizi köpürtün ve en az 30 sn. boyunca ovalayın.



4 Ellerinizi özenle durulayın.



5 Ellerinizi kullan-at kağıt havlu ile kurulayın.

Önlemler

Etiket bilgilerine başvurunuz.

+5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz.

Ürün bileşenleri

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid, Parfum (Fragrance), CI 14720.

Fiziksel veri

Renk: Pembe

Koku: Hafif kokulu

pH değeri: 6

Raf ömrü: 30 ay

Konteyner: Geri dönüşümlü PE malzemeden üretilmiştir.

Ambalaj Biçimi

500ml	1Lt havasız şişe	5Lt
✓	✓	✓

Aksesuarlar

Havasız alınmış 1 Lt'lik şişe için duvara monte uygulama haznesi.



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS



Protection 4U A NEW GENERATION



Micro 10®

Aletlerin tedaviden önce ve sonra düzgün biçimde işleme tabi tutulması son derece önemlidir. Micro 10® ürünleri, aletlerinize özen gösteren, sterilizasyondan önce dokunmayı güvenli kılan üstün temizleme gücü ile dezenfektan özellikleri sunmaktadır.



	YENİ! Micro 10® Excel	Micro 10®+	Micro 10® Enzyme	Micro 10® Power Clean	Micro 10® Detergent	Micro 10® Neutraliser	Micro 10® Lab
	Tüm dental ve cerrahi aletlerin ön sterilizasyonu ve temizliğine yönelik, yeni nesil, aldehit içermeyen yüksek performanslı bir solüsyondur.	Tüm dental ve cerrahi aletlerin ön sterilizasyonu ve temizliğine yönelik, aldehit içermeyen bir solüsyondur.	Tüm dental ve cerrahi aletlerin ön sterilizasyonu ve temizliğine yönelik güçlü, üç enzimli, aldehit içermeyen bir solüsyondur.	Dental ve cerrahi aletlerin temizliğine yönelik enzim içerikli bir solüsyondur.	Otomatik yıkama makinelerinde işleme tabi tutulan dental ve cerrahi aletlere yönelik 3 enzimli bir deterjandır.	Otomatik yıkama makinelerinde işleme tabi tutulan dental ve cerrahi aletlere yönelik, parlatici içeren bir durulama ve nötralizasyon sıvısıdır.	Değerli metal ve benzerlerinden artık, kalıntı, siman, geçici dolgu, tartar ve oksitlerin temizlenmesinde yüksek oranda etkili, güçlü, asit içerikli bir temizleme solüsyonudur.
Ana özellikler	Patentli formülasyon	Ekonomik	3 Enzimli	5 Enzimli	Mükemmel materyal uyumluluğu	Lekesiz çabuk kuruma	Güçlendirilmiş temizlik
Frezler için uygun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ultrasonik Temizleyici	✓	✓	✓	✓			✓
Seyrelti	%1 %2	%2	%2	%0.5	% 0.1'den % 0.5'e	% 0.03'ten %0.3'e	% 5'ten %10'a
Temas süresi	30 dk. 10 dk.	15 dk.	5 dk.	1 dk.			2-10 dk.
VAH/DGHM sertifikası	✓	✓					
Koku	Nane	Kokusuz	Portakal	Kokusuz	Kokusuz	Kokusuz	Kokusuz
Etkinlik							
Bakterisit	✓	✓	✓ MRSA dahil				
Miyobakterisit	✓						
Mikobakteriyum Tüberküloz		✓	✓				
Kandida albikan	✓	✓	✓				
Fungusit	✓						
HIV-1	✓	✓		✓			
PRV (HBV taşıyıcı)	✓	✓		✓			
BVDV (HCV taşıyıcı)	✓	✓		✓			
Herpes virüsü	✓	✓		✓			
Rotavirüs	✓			✓			
Norovirüs	✓						
Vaksinya virüsü	✓						
influenza virüsü H1N1			✓				
Ambalaj biçimi	1Lt / 2.5Lt	1Lt / 2.5Lt / 5Lt	1Lt / 2.5Lt / 5Lt	1Lt / 2.5Lt	5Lt	5Lt	1Lt



Micro 10⁺



Tüm dental ve cerrahi aletlere yönelik dezenfeksiyon, temizlik ve bakım.



Frezleri, kök kanal aletlerini, forsepleri, problemleri, ayna ve benzerlerini de kapsayan tüm dental ve cerrahi aletlerin ön sterilizasyonuna ve temizliğine yönelik ekonomik, aldehitsiz, konsantre bir solüsyondur. Micro 10⁺, geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Hem ıslatma tankında hem de ultrasonik temizleyicide kullanılabilir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Çok ekonomiktir, %2'lik oranda seyreltilir.
- Temas süresi: 15 dakikadır.
- Tüm aletler için uygundur.
- Aletleri paslanmaya karşı korumak için pas önleyici içerir.
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur.
- VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Micro 10⁺

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



%2 oranda Micro 10⁺'ı tankta seyreltin. (her 1 litre su için 20ml).



Aletleri solüsyona batırın ve 15 dakika bekletin.



Aletleri solüsyondan dikkatlice çıkarın ve inceleyin. Gerekirse görünen herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için fırçalayın.



Aletleri akan suyun altına tutarak ya da temiz bir suya batırıp çıkararak durulayın.



Aletleri temiz bir kâğıt havlu ile kurulayın. Paketleyin ve sterilizasyona hazırlayın.


Önlemler

Tehlikelidir – Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur). +5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz. (Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIb Tıbbi Cihaz'dır, CE0459.

Tavsiye edilen seyreltiler

Tüm dental aletler için %2 (1Lt su için 20ml)
3-8 dakikalık ultrasonik temizlik için %5 (1Lt su için 50ml).
50°C ye kadar ısıyı destekler.
Küçük aletler için, %10(1Lt su için 100ml)
örneğin kanal aletleri, elmas frezler vb.

Etkinlik

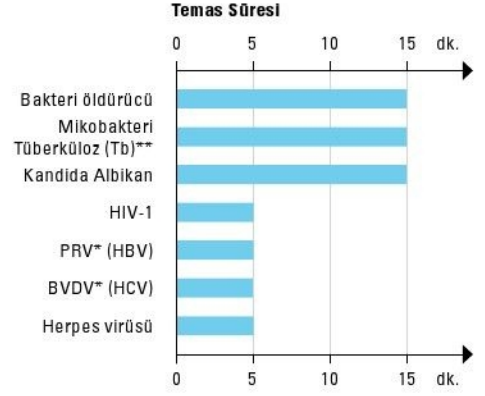

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır ** %5'lik Seyretti
* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartları ile uyumludur

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün Bileşenleri

100 gr Micro 10⁺ + 9 gr alkil dimetilbenzilamonyum klorür, amfoterik ve iyonik olmayan surfaktanlar, karışımlar, pas önleyiciler ve katkı maddeleri içerir.

Fiziksel Veriler

Renk: Uçuk sarı
Parfüm: Kokusuz
pH: 7.5 (%2 seyreltilmiş)
Raf Ömrü: Konsantre 3 yıl
Seyreltilmiş, kullanmadan .28 gün
Seyreltilmiş, kullanılmış .7 gün kirlilik miktarına bağlı

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzeme

Ambalaj Biçimi

1Lt	2,5Lt	5Lt
✓	✓	✓

Aksesuarlar

3Lt İslatma Tankı (INTANK)

Frez küveti



Enzyme 2 Micro 10®



Tüm dental ve cerrahi aletlere yönelik
dezenfeksiyon, enzimsel temizlik ve bakım.



Tüm dental ve cerrahi aletlerin sterilizasyon öncesinde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için, aldehit içermeyen, üç enzimli konsantre solüsyondur. Micro 10® Enzyme 2, geniş antimikrobiyal spektrumludur ve yüksek deterjan etkisine sahiptir. Enzimatik aktivitesi, amino asit proteinleri azaltır, glisitleri imha eder ve polisakaritler gibi kompleks yüzeylerde etkilidir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Çok ekonomik: %1 oranında seyreltilmiştir (1L = 100 litre seyreltilmiş solüsyon)
- 3 enzim - protez, amilaz ve mananaz
- Hızlı etki, yalnızca 5 dakika içinde etkisini gösterir
- Klorür içermez - korozif değildir ve her türlü malzeme tipi ile uyumludur
- Daha yüksek temizleme gücü için, ultrasonik cihazlarda kullanılabilir
- Seyreltilmesini takiben çevre açısından zararlı olarak sınıflandırılmamıştır
- Limon kokusu
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Enzyme 2 Micro 10®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Micro 10® Enzyme 2' i %1 oranında ıslatma kabında sulandırın (her 2 lt su için 20ml).



Aletleri solüsyon içine batırın ve en az 5 dakika boyunca solüsyonun etki etmesini bekleyin.



Aletleri solüsyondan dikkatlice çıkarın ve inceleyin. Gerekli olduğunda görünen herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için fırçalayın.



Aletleri akan suyun altına tutarak ya da temiz suya batırıp çıkararak durulayın.



Aletleri temiz bir kağıt havlu ile kurulayın ve sterilizasyona hazırlayın.


Önlemler

Tehlikeli - Kullanım talimatlarına uyun. Sınıf IIb Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Kullanmadan önce, etiketi ve ürüne ilişkin bilgileri okuyun.

+5°C ila +35°C arasında saklayınız.

Etkinlik

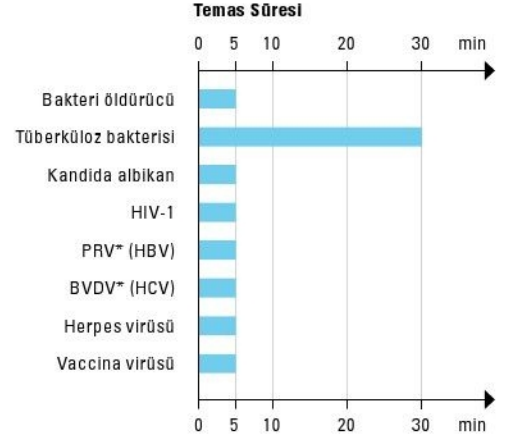

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için sınırlı virüs öldürme aktivitesini artıran dezenfektan kullanımını önerir. RKI'ya göre, sınırlı virüs öldürme aktivitesi (zararlı virüslere karşı etkili) Vaccinia virüsü ve BVDV'ye karşı bir aktiviteye karşılık gelmektedir.

Avrupa standartları ile uyumludur

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Bakteri öldürücü: EN 14348, EN 14563

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

EN 14476+A1 e göre virüsler üzerinde etkilidir

Ürün bileşenleri

100 g solüsyonda şunlar bulunur: 1,25 gr. kuaterner amonyum karbonat, iyonik olmayan tansiyon aktif maddeler, enzim kompleksleri (proteaz, amilaz ve mananez), hapsedici madde, parfüm, renklendirici, dolgu maddeleri.

Fiziksel veriler

Renk: Turuncu

Koku: Limon

pH: 8.0 (%1 sulandırılmış)

Raf Ömrü: Konsantre 2 yıl

Seyreltilmiş, kullanılmadan 1 gün

Seyreltilmiş, kullanılmış 1 gün

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Paketleme

20 ml dozluk paket	1L	2,5L	5L
✓	✓	✓	✓

Aksesuarlar

3 Lt ıslatma kabı (INTANK)

Frez ıslatma kabı



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Excel Micro 10®



Tüm dental ve cerrahi aletlere yönelik
dezenfeksiyon, temizlik ve bakım.



Dental alet ve frezlerin bakımına yönelik yeni nesil konsantre dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonudur. Micro 10® Excel'in eşsiz tasarımı ve patentli formülü bugüne kadar eşi görülmemiş anti mikrobiyal etkinlik ve temizleme özelliği sunarken, kusursuz bir aktif bileşen sinerjisi doğurur. Hem tankta hem de ultrasonik temizleyicide kullanılabilir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Çok ekonomik bir biçimde %1veya %2 oranında seyreltilir.
- İleri temizleme özelliğine sahiptir.
- Tüm alet ve frezler için uygundur.
- Sadece 10 dakika içinde mükemmel anti mikrobiyal performans sergiler.
- Sıra dışı materyal uyumu için klorür içermeyen bir formüle ve pas önleyici özelliklere sahiptir.
- Taze nane kokuludur.
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur.
- VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir.



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Excel Micro 10®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Micro 10® Excel'i %1 veya %2 oranında tankta seyreltin (her 1 litre su için 10ml veya 20ml).



Aletleri solüsyona batırın. İstenen etkinliğe bağlı olarak aletleri gereken temas süresi boyunca suda bekletin.



Aletleri solüsyondan dikkatlice çıkarın ve inceleyin. Gerekli olduğunda görünen herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için fırçalayın.



Aletleri akan suyun altına tutarak ya da temiz bir suya batırıp çıkararak durulayın.



Aletleri temiz bir kullan-at kâğıt havlu ile kurulayın. Aletleri paketleyin ve sterilizasyon için hazırlayın.

Önlemler


Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ve +35°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIb Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

Temas Süresi

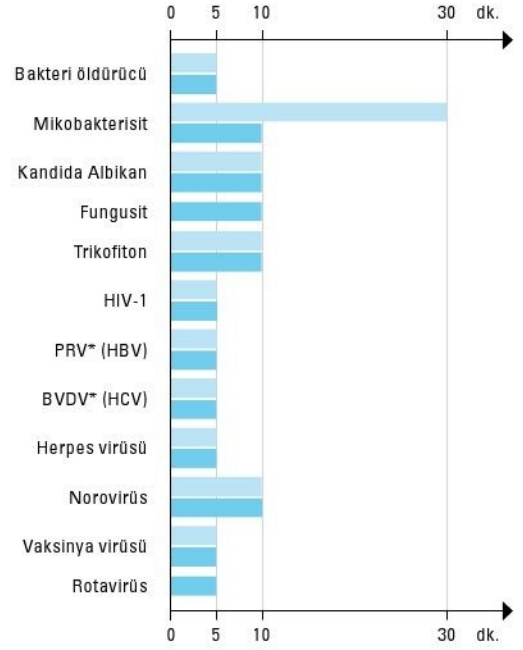

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır
* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

■ %1 Seyreltilmiş
■ %2 Seyreltilmiş

Avrupa standartlarıyla uyumlu

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Mikobakterisit: EN 14348, EN 14563

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Fungusit: EN 13624, EN 14562

Trikofiton: EN 14562

Adenovirüse karşı aktif: EN 14476 (60 dk.)

Ürün bileşenleri

100gr Micro 10® Excel, (5.35gr) kuaterner amonyum bileşikler, iyonik olmayan ve amfoter surfaktanlar, ayırıcı maddeler, parfüm, renklendirici ve yardımcı maddeler içerir.

Ambalaj Biçimi

1Lt	2,5Lt	5Lt
✓	✓	

Aksesuarlar

3Lt.lik Islatma Tankı (INTANK)

Frez küveti



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

* 1leke miktarına bağlı.

Micro 10[®] Lab



Dental muayenehanelerde ve laboratuvarlarda kullanıma yönelik güçlü temizleme solüsyonu.



Micro 10[®] Lab, kalıntı, tortu, leke, siman, geçici dolgu materyalleri ile tartar ve oksitlerin değerli materyal ve benzerlerinden çıkarılmasında yüksek ölçüde etkili, asit bazlı, konsantre bir temizleme solüsyonudur.

Ürünün başlıca özellikleri

- % 5 ila %10 oranlarında seyreltilir
- Geniş bir materyal yelpazesinde kullanılır
- Hem laboratuvarında hem de dental muayenehanelerde kullanılabilir
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Lab Micro 10®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Micro 10® Lab'ı % 5-10 oranlarında ıslatma tankında seyreltin (her 1 lt su için 50-100ml).



Temizlenecek aletleri solüsyona batırın ve 2 ila 10 dakika arasında bekletin.



Aletleri solüsyondan dikkatlice çıkarın ve inceleyin. Gerekirse görünen herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için fırçalayın.



Aletleri akan suyun altına tutarak ya da temiz bir suya batırıp çıkararak durulayın.



Temiz bir kâğıt havlu ile kurulayın.

Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz

(99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf I Tıbbi Cihaz'dır.

Islatma süresi

Paslanmaz çelik parçalar için en fazla 2 - 4 dakika.

Cam, porselen ve plastikler için en fazla 10 dakika.

Kullanım alanı:

Özellikle işlenmiş çelik parçalarda, değerli metallerde, cam, porselen, plastik (spatula gibi) maddelerde, cam tabaklar, protez kronlar, köprü ve benzerlerinde kullanım içindir.

Kullanılmamalıdır:

Drillerde, kök kanal aletlerinde, krom kaplı hasarlı aletlerde, korunmayan çelik parçalarda ve alüminyumlarda kullanılmamalıdır. Bu gibi aletlerde Micro 10® Excel, Micro 10®+ ya da Micro 10® Enzyme kullanın.

Ürün bileşenleri

100gr Micro 10® Lab, 69gr fosforik asit ve iyonik olmayan yüzey aktif maddeler içerir.

Fiziksel Veriler

Renk:	Kırmızı
Koku:	Koksuz
pH:	< 1 (%10'luk seyreltide)
Raf Ömrü:	Konsantre 3 yıl
	Kullanılmamış seyrelti 28 gün
	Kullanılmış seyrelti 7 gün

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir.

Ambalaj Bilgisi

1Lt	2,5Lt	5Lt
✓		

Aksesuarlar

3Lt.lik Islatma tankı (INTANK)



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Power Clean Micro 10®



Dental ve cerrahi aletlere yönelik
yüksek performanslı enzimatik deterjan.



Dental aletlerin arıtımına yönelik yeni nesil, enzim bazlı temizleme konsantrasyonudur. 5 enzim (amilaz, selüloz, lipaz, mannanaz ve protaz) içeren Micro 10® Power Clean, ıslatma tankında, ultrasonik temizleyicide ve yıkama makinesinde kullanılabilir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Her çeşit kir üzerinde yüksek derecede etkilidir
- 1 dakikada etki gösterir
- Biofilmler üzerinde 5 dakikadaki etkinliği kanıtlanmıştır
- Köpürmez
- Her kalitedeki suda (yumuşatılmış, şebeke suyu vb.) temizleme performansını korur
- Çok ekonomiktir: % 0.5 (1 Lt su için 5ml) oranında seyreltilir
- 1 Lt konsantreden 200 Lt solüsyon elde edilir
- Uçucu Organik Bileşensiz (UOB) bir formüle sahiptir
- Seyreltildiğinde pH değeri nötrdür



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Power Clean Micro 10®

Kullanma talimatı

Micro 10® Power Clean'i ıslatma tankında hazırlayın.

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



1 Cap = 20ml
% 0.5 (her 1 Lt su için 5ml) oranında Micro 10® Power Clean'i ıslatma tankında seyreltin.



Aletleri solüsyona batırın ve en az 1 dakika bekletin.



Aletleri solüsyondan dikkatlice çıkarın ve inceleyin. Gerekli olduğunda görünen herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için fırçalayın.



Aletleri akan suyun altına tutarak ya da temiz suya batırıp çıkararak durulayın.



Aletleri temiz bir kâğıt havlu ile kurulayın ve sterilizasyona hazırlayın.

Önlemler

Tehlikelidir – Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf I Tıbbi Cihaz'dır.

Ürün Bileşenleri

Anyonik ve iyonik olmayan tansiyoaktif ajanlar, ayrıştırıcı ajanlar, bileşik enzimler ve yardımcı maddeler içerir.

Fiziksel veriler

Renk: Mavi

Koku: Koksuz

pH: Yaklaşık 8 (saf ürün)

Yaklaşık 7.25 (seyreltilmiş)

Raf ömrü: 2 Yıl

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Ambalaj Bilgisi

1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
✓	✓	

Aksesuarlar

3 Lt.lik Islatma Tankı (INTANK)



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS



Detergent Micro 10® WD

Otomatik dezenfeksiyon makinesinde
kullanıma yönelik enzimatik deterjan.



Yeni nesil, konsantre, üç enzimli deterjan, özellikle otomatik dezenfeksiyon makinesinde kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Mükemmel materyal uyumluluğu ile yoğun temizleme etkisi ürünü, tüm ısıya dayanıklı, dental ve medikal aletler için uygun kılar.

Ürünün başlıca özellikleri

- Paslanmaz çelik, titanyum, polisülfon, PVC/ABS, elokseli alüminyumlar vb. ile uyumludur
- Bazik pH değerine sahiptir
- En iyi enzimatik etkiyi +30°C ve +60°C arasında gösterir
- Organik kalıntılar için tavsiye edilir
- Yıkama makinelerinin çoğu ile uyumludur
- Makine türüne bağlı olarak % 0.1 ile %0.5 arasında seyreltilir
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- Micro 10® WD Neutraliser ile birlikte kullanın



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Detergent Micro 10[®] WD

Ürün bileşenleri

Anyonik ve iyonik olmayan maddeler, ayrıştırıcı maddeler, bileşik enzimler ve yardımcı maddeler içerir.

Fiziksel veriler

Renk: Açık sarı/berrak

pH: Yaklaşık 10.3
(20°C.de saf ürün)

Yaklaşık 7.9
(musluk suyu ile %0.5'lik seyreltide)

Yaklaşık 10
(demineralize su ile %0.5'lik seyreltide)

Raf ömrü: 2 Yıl

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Önlemler

Etikete başvurunuz (kullanım önlemleri 99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ve +35°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf I Tıbbi Cihaz'dır.

Ambalaj Bilgisi

1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
		✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS



Neutraliser Micro 10° WD

Otomatik yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için nötralize edici, lubrikasyon ve yıkama solüsyonu.



Otomatik yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde işleme tabi tutulan dental ve medikal aletlere yönelik lubrikasyon etkili nötralize edici yıkama solüsyonudur. Kalıntı bırakmadan çabuk kuruyan ikili etkiye sahiptir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Mükemmel materyal uyumluluğuna sahiptir
- Lubrikasyon etkisi mevcuttur
- İşlenmiş veya işlenmemiş her sertlik derecesindeki su ile kullanılabilir
- Dezenfeksiyon makinelerinin çoğu ile uyumludur
- Makine tipine bağlı olarak % 0.03 ile % 0.3 oranları arasında seyreltilir
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- Micro 10° WD Detergent formu ile birlikte kullanın



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Micro 10[®] WD

Neutraliser

Ürün bileşenleri

İyonik olmayan ve anyonik yüzey aktif maddeler, isopropanol ve yardımcı maddeler içerir.

Fiziksel veriler

Renk: Berrak

pH: 2 - 3 (20°C.de saf ürün) yaklaşık olarak 7
(%0.2 oranında seyreltilmiş)

Raf ömrü: 3 Yıl

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Önlemler

Tehlikelidir – Kullanım önlemlerine bağlı kalınız (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +25°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf I Tıbbi Cihazdır.

Paketleme

1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
		✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS



Protection 4U A NEW GENERATION



Unisepta®

Unisepta® ürünleri, temiz ve güvenli bir çevre yaratırken kısıtlı zamanlarda örneğin iki hasta arasında pratik bir kullanım sağlar. İster hassas materyaller için ister hızlı dezenfeksiyon için kullanılsın Unisepta® ürün grubu, tüm uygulamalar için bir çözüm sunar.



Unisepta® Foam

Medikal cihaz yüzeylerine yönelik sprey formunda dezenfeksiyon ve temizleme köpüğüdür.

Unisepta® Foam Wipes

Medikal cihaz yüzeylerine yönelik dezenfeksiyon ve temizleme mendildir.

Unisepta® Light

Medikal cihaz yüzeylerine yönelik sprey formunda dezenfektandır.

Unisepta® Plus

Medikal cihaz yüzeylerine yönelik sprey formunda dezenfektandır.

Unisepta® Plus Wipes

Medikal cihaz yüzeylerine yönelik mendil formunda dezenfektandır.

YENİ! Unisepta® All Surfaces

Tüm yüzeylere yönelik konsantrde dezenfeksiyon ve temizleme solüsyonudur.

Ana özellikler

Alkolsüz formüle sahiptir

Alkolsüz formülüdür. Bio-çözünür materyal-den üretilmiştir

Düşük alkol içeriği

Hızlı

Hızlı

Ekonomiktir
Geniş yüzeyler, zemin, vb içindir.

Form

Kullanıma hazır

Mendil

Kullanıma hazır

Kullanıma hazır

Mendil

Konsantrde

Seyrelti

%1

Temas süresi

1-5 dk.

1-5 dk.

5 dk.

30 sn.

30 sn.

15 dk.

VAH/DGDM sertifikası

✓

✓

✓

✓

✓ emdirilmiş solüsyonda

Koku

Portakal

Kokusuz

Hafif kokulu

Taze turunç

Taze turunç

Taze turunç

Etkinlik

Bakterisit

✓ MRSA dahil

✓ MRSA dahil

✓ MRSA dahil

✓ MRSA dahil

✓ MRSA dahil

✓

Tüberkülosit

✓

✓

✓

Mikobakteriyum tüberküloz

✓

Kandida albikan

✓

✓

✓

✓

✓

✓

HIV-1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

HBV

✓

PRV (HBV taşıyıcı)

✓

✓

✓

✓

✓

BVDV (HCV taşıyıcı)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Herpes virüsü

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rotavirüs

✓

✓

✓

✓

✓

Vaksinya virüsü

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Influenza virüsü H1N1

✓

✓

✓

✓

✓

RSV

✓

✓

Adenovirüs

✓

✓

Koronavirüs (SARS taşıyıcı)

✓

✓

Ambalaj biçimi

750 ml sprey / 5Lt

100 mendillik paket

750 ml sprey / 5Lt

750 ml sprey / 5Lt

150 mendil
(kutu & yedek)

2.5Lt

Plus Unisepta®



Tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonu.

Tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonuna yönelik yüksek kalitede, kullanıma hazır, alkol bazlı solüsyondur. Unisepta® Plus, 30 saniyelik bir etki süresiyle iki hasta arasındaki dezenfeksiyon için idealdir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlıdır
- Temas süresi: 30 saniyedir
- Mükemmel etkinlik spektrumuna sahiptir
- Kalıntı veya iz bırakmaz
- Taze turuncu kokusundadır
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Plus Unisepta®

Kullanım talimatı

Kullanmadan önce

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



1 Uygulanacak alanın önceden temizlendiğinden ve alkole karşı dayanıklı olduğundan emin olun.



2 Solüsyonu her yere eşit miktarda sıkın.



3 Solüsyonu tesir etmesi için en az 30 saniye bekleyin. **Durulamayın!**


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifive uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ve +25°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

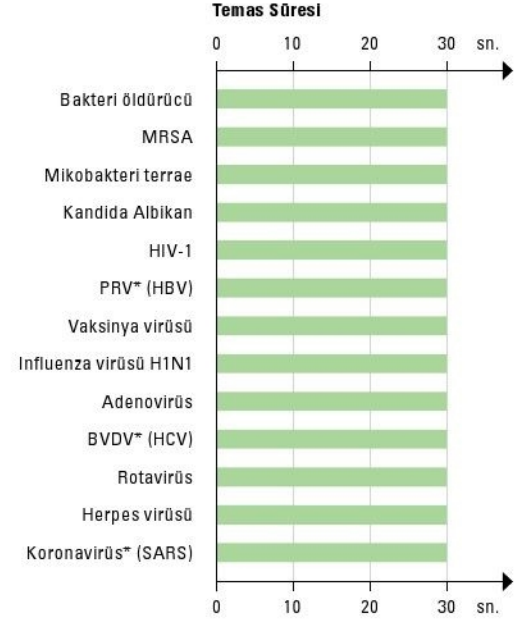

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

* Koronavirüs: SARS yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla Uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561

Tüberküloz: EN 14348, EN 14563

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün Bileşenleri

100gr Unisepta® Plus, Etanol (55gr), didesilmetil oksietilamonyum propiyonat (0.11gr) ve esans içerir.

Fiziksel veri

Renk: Renksiz

Koku: Taze turunc kokusu

Raf ömrü: 3 yıl

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Ambalaj Bilgisi

750ml Sprey	1Lt	2,5Lt	5Lt
✓			✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Plus Wipes Unisepta®



Tıbbi cihaz yüzeylerine yönelik hızlı dezenfeksiyon mendili.

Tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonuna yönelik kullanıma hazır, tek kullanımlık mendillerdir. Unisepta® Plus Wipes'a, Unisepta® Plus solüsyonu emdirilmiştir. Kullanışlı, ekonomik ve geniş bir etkinlik spektrumuna sahiptir. İki hasta arasındaki dezenfeksiyon işlemi için idealdir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlıdır
- Temas süresi: 30 saniyedir
- Taze turuncu kokusundadır
- Kalıntı veya iz bırakmaz
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- Unisepta® Plus Solüsyonu VAH/DGDM sertifikalarına sahiptir
- Mendil ebatları 130 x 200mm'dir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Plus Wipes Unisepta®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



1 Mendili yukarı doğru çekerek konteynerden çıkarın ve ani bir çekişle koparın.



2 Mendil biçimindeki dezenfektanı daha önceden temizlenmiş alana uygulayın.



3 Solüsyonun tesir etmesi için en az 30 saniye bekleyin. **Durulamayın!**



4 Her kullanımdan sonra konteynerin güvenli bir biçimde kapatıldığından emin olun.


Önlemler

Tehlikelidir – Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ve +25°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik†

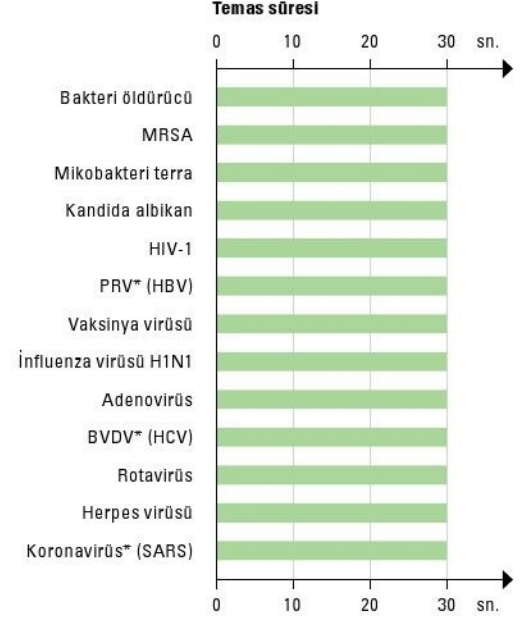

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

* Koronavirüs: SARS yerine kullanılır

† Emilmiş solüsyon etkinliği

Avrupa standartlarıyla uyumludur

Emilmiş solüsyon için:

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561

Tüberküloz: EN 14348, EN 14563

Mantar öldürücü: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün bileşenleri

100gr emdirilmiş Unisepta® Plus solüsyonu, 55gr Etanol, 0.11gr didesilmetil oksietilamonyum propiyonat ve esans içerir.

Fiziksel veri

Renk: Beyaz Mendil

Koku: Taze turunç esansı

Raf ömrü: 3 yıl (açılmamış)

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Paketleme

	150 Mendil
Konteyner	✓
Yedek	✓

■ Foam 2 Unisepta®



Tıbbi cihazların temizliği ve hızlı dezenfeksiyonuna yönelik.

Tıbbi cihaz yüzeylerine yönelik kullanıma hazır dezenfeksiyon ve temizlik köpüğüdür. Unisepta® Foam özellikle dental koltuk döşemeleri gibi alkole karşı hassas bölgeler için uygundur. Unisepta® Foam 2 benzer yüzeylerin kurumasını, çatlamasını veya soyulmasını engelleyerek doğal yumuşaklığını koruyacaktır.

Ürünün ana özellikleri

- Temas süresi 1 - 5 dakikadır
- Alkolsüz olarak formüle edilmiştir
- Materyal uyumluluğu mükemmeldir
- Taze portakal kokuludur
- Disci koltugu temizliği için idealdir
- Leke ve atık bırakmaz
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | Switzerland
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Unisepta® Foam 2

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Unisepta® Foam 2'yi dezenfekte edilecek ve temizlenecek alana doğrudan uygulayınız.



Dokumasız bir bez kullanarak köpüğü uygulanacak bölgeye eşit miktarda dağıtınız.



İstenen antimikrobiyal aktiviteyi elde etmek için belirtilen temas süresini dikkate alınız. Mukozaya temas etme ihtimali yoksa tıbbi cihazın durulanmasına gerek yoktur.


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz. Ila sınıfı tıbbi cihaz, CE0459.

Kullanımdan önce, etiketi ve ürüne ilişkin bilgileri okuyun.

+5°C ila +35°C arasında muhafaza edin.

Etkinlik

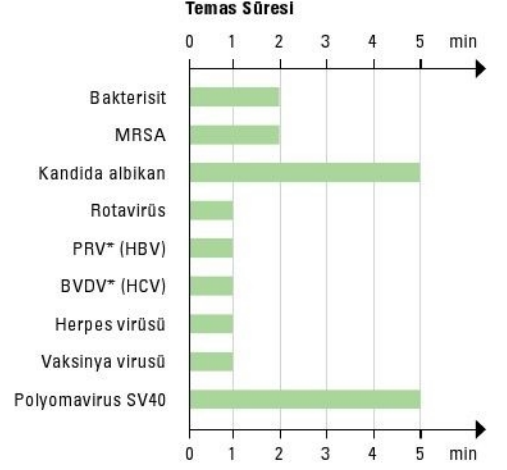

* PRV: Hepatit B taşıyıcısı

* BVDV: Hepatit C taşıyıcısı

Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için sınırlı virüs öldürme aktivitesini artıran dezenfektan kullanılmasını önerir. RKI'ya göre, sınırlı virüs öldürme aktivitesi (zarflı virüslere karşı etkili) Vaccinia virüs ve BVDV'ye karşı bir aktiviteye karşılık gelmektedir.

Avrupa standartlarıyla uyumlu

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 13697

MRSA: EN 13727, EN 13697

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 13697

Ürün bileenleri

100 g Unisepta® Foam 2 da şunlar bulunur: 0,30 g didesildimetilamonyum klorür, dolgu maddeleri.

Fiziksel veri

Renk: Renksiz

Koku: Taze portakal esansı

Raf ömrü: 2 yıl

Ambalaj: Geri dönüşümlü HDPE materyalden üretilmiştir.

Paketleme

750ml Sprey	1L	2,5L	5L
✓			✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS



■ Foam 2 Wipes Unisepta®

Medikal sistemlerin yüzeylerinin
dezenfeksiyonu ve çabuk temizlenmesi



Tıbbi aletlerin temizlenmesi ve çabuk bir şekilde dezenfekte edilmesi için, %100 biyolojik dönüşümlü, kullanıma hazır mendiller.

Ürünün ana özellikleri

- Alkolsüz formüllü solüsyona batırılmıştır
- Temas süresi: 1 - 5 dakika
- Viskoz mendiller - %100 dönüşümlü
- Parfüm veya diğer herhangi başka bir alerjen madde içermez
- Diş hekimi koltuğunun temizlenmesi için idealdir
- Ebatlar: 180 x 200mm
- Tıbbi aletlere ilişkin 93/42/CE Direktifine uygun olarak CE markasını almıştır
- 100 mendilli paket



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Genève | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Faks + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

■ Foam 2 Wipes Unisepta®

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenler kullanın.



1 Mendili torbasından çıkarın.



2 Mendili temizlenecek yüzeye uygulayın.



İstenen mikrop öldürücü etki için, belirtilen temas süresine uyun. Tıbbi cihazın deri veya mukoza ile temas etme durumu hariç, herhangi bir durulama gerekmez.



4 Her kullanımdan sonra torbanın ağzının iyice kapandığından emin olun.


Önlemler

Tehlikeli - kullanım talimatlarına uyun. CE0459 Ila sınıflı medikal sistem.

Kullanımdan önce, etiketi ve ürüne ilişkin bilgileri okuyun.

+5°C ila +35°C arasında muhafaza edin.

Etkinlik†

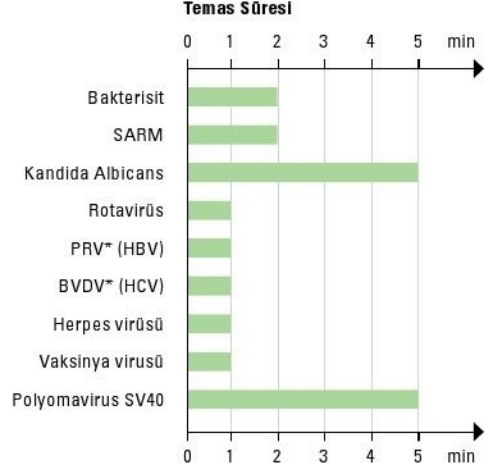

* PRV: Hepatit B taşıyıcısı

* BVDV: Hepatit C taşıyıcısı

† Kullanılan solüsyonun etki alanı

Robert Koch (RKI) Enstitüsü, enfeksiyon zincirinin kırılması için, sınırlı virüs öldürücü etkili dezenfektan kullanımını tavsiye etmektedir. RKI'ya göre, sınırlı virüs öldürücü etki (zarflı virüsler üzerinde etkili) Vaccinia virüsü ve BVDV üzerinde etkiye karşılık gelir.

Avrupa standartlarıyla uyumlu

Kullanılan solüsyon:

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 13697

SARM: EN 13727, EN 13697

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 13697

Ürün bileenleri

100 g solüsyonda şunlar bulunur: 0,30 g didesil dimetil amonyum klorür, dolgu maddeleri.

Fiziksel veri

Viskos mendil (dokusuz, örgüsüz spunlace 50gr/m2),

%100 çözünümlü hazır mendil.

Renk: Beyaz mendil

Parfüm: Without perfume

Raf ömrü: 2 yıl (açılmadan)

Paketleme

	100 Mendil	150 Mendil
Paket	✓	

Light 2 Unisepta®



Tıbbi cihaz yüzeylerine
yönelik hızlı dezenfeksiyon.

Tıbbi aletlerin yüzeylerinin çabuk bir şekilde dezenfekte edilmesi için, alkol bazlı, kullanıma hazır solüsyon. Yalnızca 1 dakika gibi bir sürede etki etme özelliği sayesinde, Unisepta® Light 2 hastalar arasında kullanım için idealdir.

Ürünün ana özellikleri

- Etanol bazlıdır
- Temas süresi: 1 dakika
- Kalıntı bırakmaz
- Hafif kokuludur
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- Yalnızca %40 oranında alkol içerir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Light 2 Unisepta®

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi


Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



İşlem uygulanacak alanın daha önceden temizlenmiş olduğundan emin olun.



Solüsyonu doğrudan dezenfekte edilecek bölge üzerine veya tek kullanımlık bir bez üzerine dökün. Solüsyonu işlem görece alanı eşit miktarda sıkın.

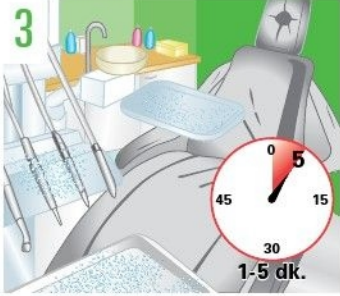

İstenen mikrop öldürücü etki için, temas süresine dikkat edin.

Durulamayın!


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz. Ila sınıfı tıbbi cihaz, CE0459.

Kullanımdan önce, etiketi ve ürüne ilişkin bilgileri okuyun.

+5°C ila +25°C arasında saklayınız.

Etkinlik

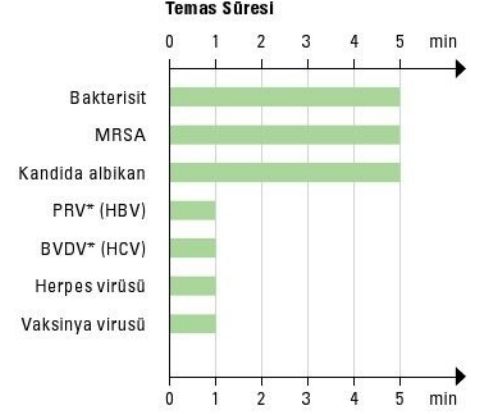

* PRV: Hepatit B taşıyıcısı

* BVDV: Hepatit C taşıyıcısı

Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için sınırlı virüs öldürme aktivitesini artıran dezenfektan kullanılması önerir. RKI'ya göre, sınırlı virüs öldürme aktivitesi (zarflı virüslere karşı etkili) Vaccinia virüs ve BVDV'ye karşı bir aktiviteye karşılık gelmektedir.

Avrupa standartlarıyla uyumlu

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 13697

MRSA: EN 13727

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 13697

Ürün bileenleri

100 g solüsyonda şunlar bulunur: Etanol (327 mg/g), N-(3-aminopropil)-N-dodesilpropan-1,3-diamin (1,4 mg/g), didesil dimetil amonyum klorü (1,1 mg/g), parfüm, dolgu maddeleri.

Fiziksel veri

Renk: Renksiz

Koku: Hafif kokulu

Raf ömrü: 2 yıl

Ambalaj: Geri dönüşümlü HDPE materyalden üretilmiştir

Paketleme

750ml Sprey	1L	2,5L	5L
✓			✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

All Surfaces Unisepta®



Tüm yüzeyler için dezenfeksiyon ve temizlik.

Unisepta® All Surfaces dental muayenehanelerin tüm bölümlerinde, zemin, duvar, kapı ve benzeri yerlerde kullanıma yönelik konsantre bir dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonudur.

Ürünün başlıca özellikleri

- %1 oranında seyrelti son derece ekonomiktir.
- Aldehit içermez.
- Tüm geniş yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Renkli yüzeylerde iz bırakmadan kurur.
- Yapışmayan formüle sahiptir.
- Durulamaya ihtiyaç yoktur.
- Sadece 15 dk. içinde mükemmel bir antimikrobiyal performans sergiler.
- Taze narenciye esanslıdır.



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

All Surfaces Unisepta®

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.




Unisepta® All Surfaces'i % 1 oranında seyreltin (1 litre su için 10ml).



Zemin temizliği için bir paspas yardımı ile gösterilen şekilde solüsyonu tüm yüzeye eşit bir şekilde dağıtın. Lokal hijyen planına başvurun.



Solüsyon kirlendiğinde dökerek gerektiğinde yeni bir solüsyon hazırlayın.

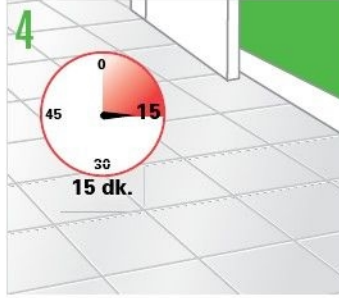

Solüsyonun etki etmesi için en az 15 dk. tüm yüzey tamamen kuruyana kadar bekleyin.




Her bir uygulama sonunda paspası temiz Unisepta® All Surfaces solüsyonunun içinde en az 15 dk. bekletin.

Önlemler

Tehlikelidir. Kullanma talimatına uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur). Biyositleri dikkatli kullanınız. Her kullanım öncesi, etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz. +5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz. Yüzeylerin dezenfeksiyonuna yönelik biyosidal bir üründür. (Grup 1 – PT2).

Etkinlik

Temas süresi

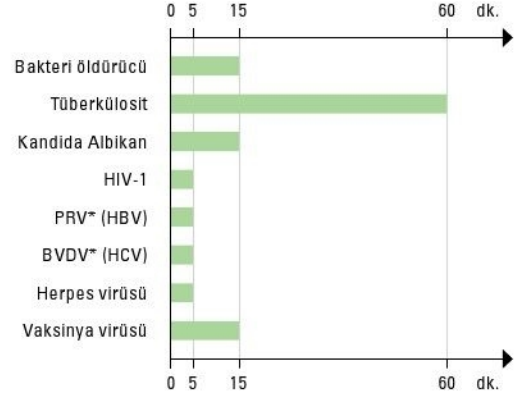

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır
* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa standartlarıyla uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 1276, EN 13697

Tüberkülo öldürücü: EN 14348, EN 14563

Yestisit: EN 1275, EN 1650, EN 13697

Ürün bileşenleri

Unisepta® All Surfaces N-(3-aminopropil)-N-dodesilpropan-1, 3-diamin (CAS N° 2372-82-9 : 15,3 mgr/gr), didesil dimetilamonyum klorür (CAS N° 7173-51-5: 7,5 mgr/gr) ve katkı maddeleri içerir.

Fiziksel veri

Renk: Yeşil

Koku: Narenciye

pH: Konsantre 10.8
%1 Seyreltildiğinde 9.3

Raf ömrü: Konsantre 2 yıl

Koteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir.

Ambalaj Bilgisi

750ml Sprey	1Lt	2,5Lt	5Lt
		✓	



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS



Protection 4U A NEW GENERATION



TR

Vacucid®

Unident® Impre

Sakşın sisteminin doğru temizlenmesi ve bakımını sağlar, biofilmlerin ve kötü kokuların oluşmasını engeller.



Dental ölçü materyallerinin dezenfeksiyonu ve temizliğini sağlar.



Vacucid®

Tüm sakşın sistemlerine yönelik günlük dezenfeksiyon, temizleme ve koku giderme işlemlerini gerçekleştirir.

Ana Özellikler

Köpüksüz

Form

Konsantre

Seyrelti

%2

Temas süresi

15 dk.

VAH/DGHM sertifikası

✓

Etkinlik

Bakterisit

✓

Mikobakteriyum tüberküloz

✓

Tüberkülesit

✓

Kandida albikan

✓

Fungusit

✓

HIV-1

✓

HBV

✓

PRV (HBV taşıyıcı)

✓

BVDV (HCV taşıyıcı)

✓

Herpes virüsü

✓

Ambalaj biçimi

1Lt / 5Lt

Unident® Impre

Aljnat, silikon, polieter, polisülfür, hidrokoloit dental ölçülerin dezenfeksiyonu ve temizlenmesini sağlar.

Unident® Impre 10

Aljnat, silikon, polieter, polisülfür, hidrokoloit dental ölçülerin dezenfeksiyonu ve temizlenmesini sağlar.

Güvenilirdir ve boyutsal istikrardan taviz vermez

Konsantre

Aktif oksijen toz içerikli konsantre

%10

%2

15 dk.

10 dk.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

1Lt

1kg

Vacucid® Systematic

Seyreltilmiş Vacucid® solüsyonunu tüm sakşın sistemlerinde karıştırmaya ve hazırlamaya yönelik doz sistemidir. Basit ve çabuk bağlantı için iki adaptöre sahiptir. 2 Lt.ye kadar solüsyon hazırlanabilir.

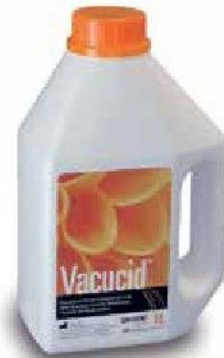

Unident® Impre



Dental ölçülerin dezenfeksiyonu ve temizliği.



Unident® Impre, dental ölçülerin, ölçü kalıplarının, takma dişlerin, protez cihazları vb. etkili dezenfeksiyonu ve temizliğine yönelik konsantre likittir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Seyreltme: %10 oranında seyreltilir
- Temas süresi: 15 dakikadır
- Aljinat, silikon polieter lastikler, polisulfid ve hidrokoloit ölçü materyalleri için uygundur
- Güvenlidir – ölçü yüzeyine veya ebatlarına olumsuz bir etkisi yoktur
- Mükemmel materyal uyumluluğu mevcuttur
- Geniş bir etkinlik spektrumuna sahiptir
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Unident® Impre

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Unident® Impre'yi ıslatma tankında %10 oranında seyreltin (her 1 litre su için 100ml)



Ölçüleri solüsyona batırın ve 15 dk. bekletin.



Ölçüleri solüsyondan çıkarın ve akan suyun altında iyice durulayın.



Tek kullanımlık kâğıt havlu ile derhal kurulayın.


Önlemler

Tehlikelidir - Kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +35°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIb Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

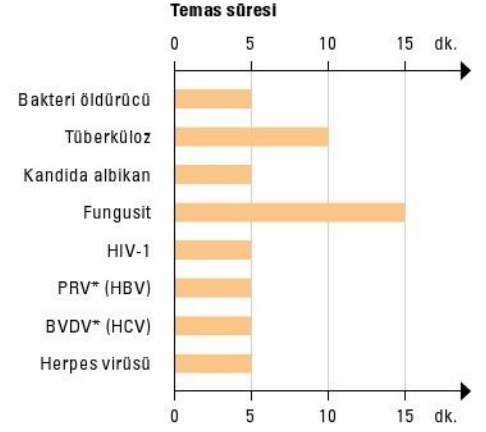

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla Uyumludur

Bakteri öldürücü:	EN 1040, EN 13727, EN 14561
Tüberküloz öldürücü:	EN 14348 (60 dk.), prEN 14563
Yestisit:	EN 1275, EN 13624
Mantar öldürücü:	EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün bileşenleri

100gr Unident® Impre 2.75gr N-alkil-N- benzil-N klorür, N-dimetilamonyum ve 5gr glutaraldehid içerir.

Fiziksel veri

Renk:	Renksiz
pH değeri:	2.5 (konsantre)
Raf Ömrü:	Konsantre 3 yıl
	Seyreltilmiş 7 gün en fazla*
Konteyner:	Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

*Kir miktarına bağlıdır.

Paketleme

1kg	1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
	✓		

Aksesuarlar

3 Lt.lik ıslatma tankı (INTANK)




ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Unident® Impre 10

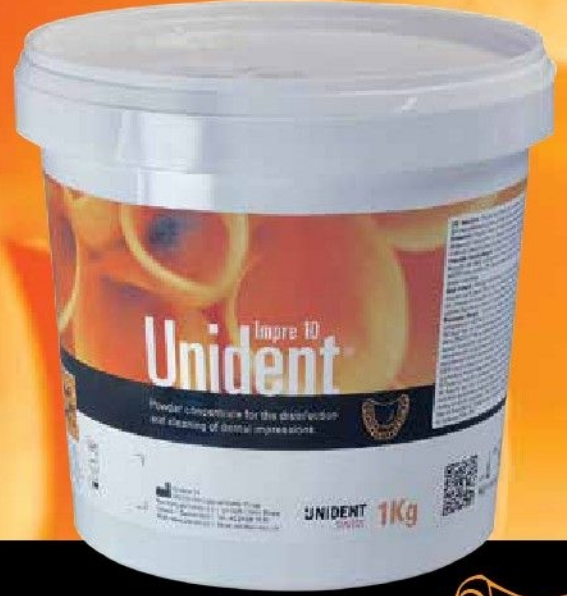

Dental ölçülerin dezenfeksiyonu ve temizliği.



Mükemmel dezenfeksiyon ve temizleme özelliğine sahip, aktif oksijen ve toz bazlı, konsantre bir üründür. Unident® Impre 10 özellikle dental ölçülere, ölçü kalıplarına, takma dişlere, protez cihazlarına vb. yönelik olarak tasarlanmıştır.

Ürünün temel özellikleri

- Ekonomiktir, %2 oranında seyreltilir
- Temas süresi: 10 dakikadır
- Aljinat, silikon, polieter ve hidrokoloit ölçü materyalleri için uygundur
- Güvenlidir – ölçü yüzeyine veya ebatlarına olumsuz bir etkisi yoktur
- Geniş bir etkinlik spektrumuna sahiptir
- 1kg toz, 50 litrelik kullanıma hazır solüsyon sağlar
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Unident® Impre 10

Kullanma talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Unident® Impre 10'u ıslatma tankında %2 oranında seyreltin (2.5 litre soğuk veya ılık suya 50gr). Paketteki ölçü kaşığına kullanın. (2 x 25gr'lık kaşık). Tozun tamamen çözünmesine müsaade edin.



Ölçüleri solüsyona batırın ve 10 dk. bekletin.



Ölçüleri solüsyondan çıkarın ve akan suyun altında iyice durulayın.



Tek kullanımlık kâğıt havlu ile derhal kurulayın.


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ila +30°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIb Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

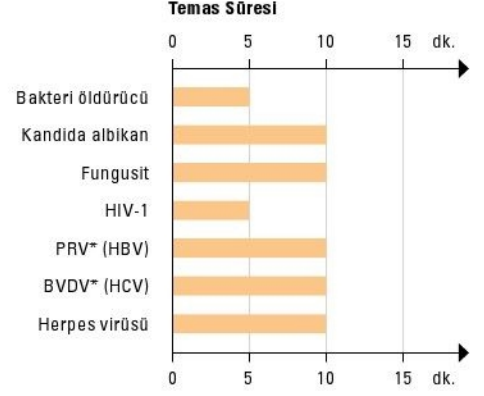

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır
* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla Uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Tüberküloz öldürücü: EN 14563 (60 dk.)

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Fungu öldürücü: EN 14562

Ürün bileşenleri

Toz, pentapotasyum iki(peroksi mono sülfat) iki(sülfat), iyonik olmayan ve anyonik maddeler, bağlayıcı ve asitleştirici ajanlar içerir. Tozun su ile seyreltilmesinden sonra aktif oksijen salgılar.

Fiziksel Veri

Renk: Beyaz Toz

Raf Ömrü: Konsantre 2 yıl

Kullanılmamış seyrelti 1 gün

Kullanılmış seyrelti 1 gün

Konteyner: Geri dönüşümlü PP malzemeden üretilmiştir

Ambalaj Bilgileri

1kg	1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
✓			

Aksesuarlar

3 Lt.lik ıslatma tankı (INTANK)



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS

Vacucid®



Dental sakşın sistemlerine yönelik
köpürmeyen, üç etkili konsantre solüsyon.

Vacucid® sakşın hatlarını eş zamanlı olarak dezenfekte eder, temizler ve kokusunu giderir. Günlük uygulama ile katı atıkları çözerek ve sakşın hatlarının temiz kalmasını, dezenfekte edilmesini ve kokusuz bir biçimde muhafaza edilmesini sağlayarak, sistem içinde biofilm oluşumunu engeller.

Ürünün başlıca özellikleri

- Ekonomiktir % 2 oranında sulandırılır
- Temas süresi 15 dakikadır
- Günlük kullanıma uygun tasarlanmıştır
- 5 litre Vacucid® 125 uygulama için yeterlidir
- Aldehit, fenol ve klorür içermez
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir
- Vacucid® Sistematik (Uygulama kabı), kullanım ve uygulama kolaylığı sağlar



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Vacucid®

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Vacucid® Systematic kullanarak, % 2 oranında seyreltilir. (2 litre solüsyon için 40ml).



Solüsyonu karıştırmak için Vacucid® Systematic 'i hafifçe sallayarak karıştırın.



Vacucid® Systematic kabını Sakşın sistemine bağlayarak seyreltilmiş solüsyonu çektiniriz.



Solüsyonun etki etmesi için en az 15 dk. bekletin. Solüsyon gece boyunca sistemde bırakılabilir.



Vacucid® Systematic 'i temiz su ile doldurunuz.




Sakşın sistemini (minimum 1 litre) temiz suyun çekilmesi ile durulayabilirsiniz.

Önlemler:

Tehlikelidir. Kullanma talimatına uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur. +5°C ila +35°C arasında muhafaza edin. (Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır, CE0459.

Etkinlik

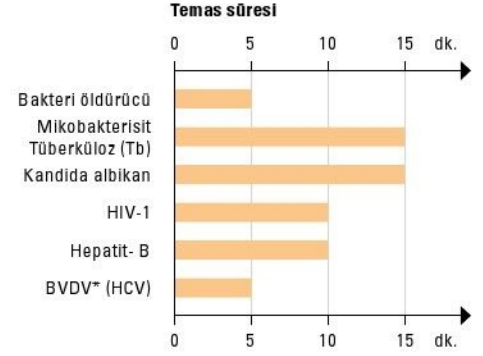

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Yestisit: EN 1275, EN 13624

Ürün bileşenleri

Kuaterner amonyum (45.4 mgr/gr), polihekzamethilen biguanid hidroklorür (4 mgr/gr), artırcı ve kireç çözücü ajanlar içerir.

Fiziksel Veri

Renk: Açık sarı

Koku: Hafif kokulu

pH değeri: 2.0 (konsantre)

Raf ömrü: Konsantre 3 yıl

Kullanılmış seyrelti 7 gün

Ambalaj: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Ambalaj Bilgisi

1kg	1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
	✓		✓

Aksesuarlar

Vacucid® Systematic (424051)



(424051)



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS