

Plus Unisepta®



Tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonu.

Tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonuna yönelik yüksek kalitede, kullanıma hazır, alkol bazlı solüsyondur. Unisepta® Plus, 30 saniyelik bir etki süresiyle iki hasta arasındaki dezenfeksiyon için idealdir.

Ürünün başlıca özellikleri

- Etanol bazlıdır
- Temas süresi: 30 saniyedir
- Mükemmel etkinlik spektrumuna sahiptir
- Kalıntı veya iz bırakmaz
- Taze turuncu kokusundadır
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Plus Unisepta®


Kullanım talimatı

Kullanmadan önce


Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.



Uygulanacak alanın önceden temizlendiğinden ve alkole karşı dayanıklı olduğundan emin olun.

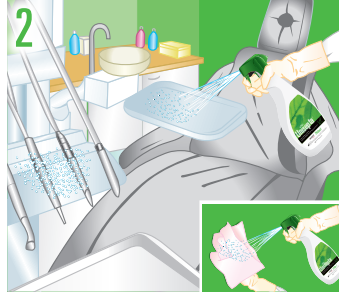

Solüsyonu her yere eşit miktarda sıkın.

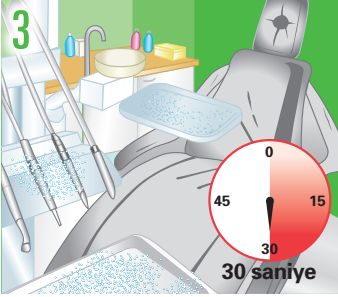

Solüsyonu tesir etmesi için en az 30 saniye bekleyin. **Durulamayın!**


Önlemler

Tehlikelidir – kullanım önlemlerine uyunuz (99/45/CE Direktive uyarlamalarına göre oluşturulmuştur).

+5°C ve +25°C arasında muhafaza ediniz.

(Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır.

Etkinlik

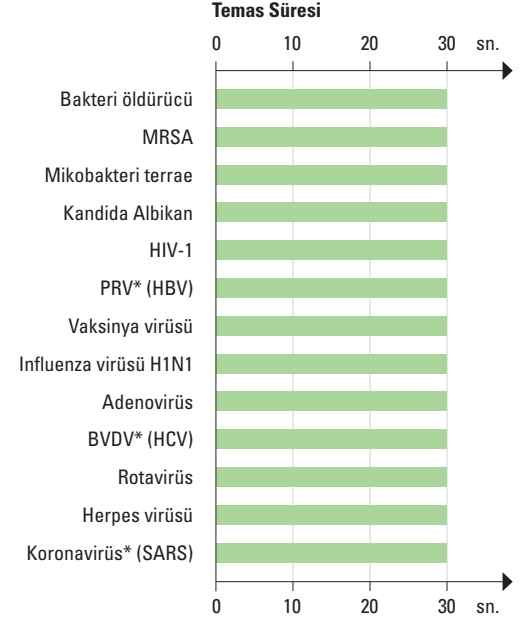

* PRV: Hepatit B yerine kullanılır

* BVDV: Hepatit C yerine kullanılır

* Koronavirüs: SARS yerine kullanılır

Avrupa Standartlarıyla Uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561

Tüberküloz: EN 14348, EN 14563

Yestisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Ürün Bileşenleri

100gr Unisepta® Plus, Etanol (55gr), didesilmetil oksietilamonyum propiyonat (0.11gr) ve esans içerir.

Fiziksel veri

Renk: Renksiz

Koku: Taze turunç kokusu

Raf ömrü: 3 yıl

Konteyner: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

Ambalaj Bilgisi

750ml Sprey	1Lt	2,5Lt	5Lt
✓			✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS