

# Vacucid®



Dental sakşın sistemlerine yönelik köpürmeyen, üç etkili konsantre solüsyon.

Vacucid® sakşın hatlarını eş zamanlı olarak dezenfekte eder, temizler ve kokusunu giderir. Günlük uygulama ile katı atıkları çözerek ve sakşın hatlarının temiz kalmasını, dezenfekte edilmesini ve kokusuz bir biçimde muhafaza edilmesini sağlayarak, sistem içinde biofilm oluşumunu engeller.

## Ürünün başlıca özellikleri

- Ekonomiktir % 2 oranında sulandırılır
- Temas süresi 15 dakikadır
- Günlük kullanıma uygun tasarlanmıştır
- 5 litre Vacucid® 125 uygulama için yeterlidir
- Aldehit, fenol ve klorür içermez
- CE işaretlidir – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumludur
- VAH/DGHM sertifikalarına sahiptir
- Vacucid® Sistematik (Uygulama kabı), kullanım ve uygulama kolaylığı sağlar



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | İsviçre  
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com  
[www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com)

**UNIDENT**  
SWISS

# Vacucid®

## Kullanma Talimatı

### Kullanım öncesi

Uygun eldivenin giyildiğinden emin olun.




Vacucid® Systematic kullanarak, % 2 oranında seyreltilir. (2 litre solüsyon için 40ml).



Solüsyonu karıştırmak için Vacucid® Systematic 'i hafifçe sallayarak karıştırın.



Vacucid® Systematic kabını Sakşın sistemine bağlayarak seyreltilmiş solüsyonu çektiniriz.

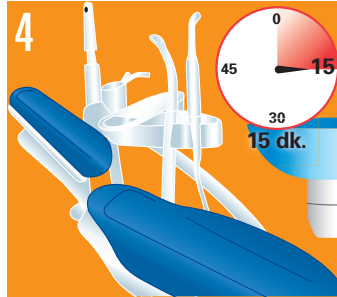

Solüsyonun etki etmesi için en az 15 dk. bekletin. Solüsyon gece boyunca sistemde bırakılabilir.



Vacucid® Systematic 'i temiz su ile doldurunuz.




Sakşın sistemini (minimum 1 litre) temiz suyun çekilmesi ile durulayabilirsiniz.

### Önlemler:

Tehlikelidir. Kullanma talimatına uyunuz (99/45/CE Direktifi ve uyarlamalarına göre oluşturulmuştur. +5°C ila +35°C arasında muhafaza edin. (Değiştirilmiş 93/42/CEE Direktifi)'ne göre Sınıf IIa Tıbbi Cihazdır.

## Etkinlik

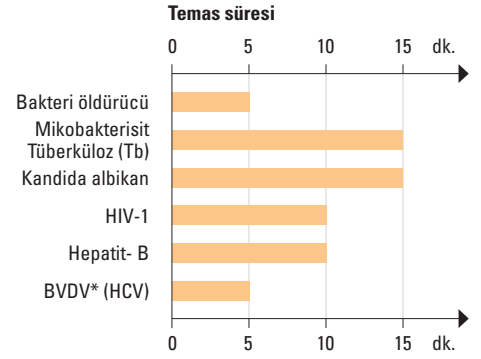

### Avrupa Standartlarıyla uyumludur

Bakteri öldürücü: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Yestisit: EN 1275, EN 13624

### Ürün bileşenleri

Kuaterner amonyum (45.4 mgr/gr), polihekzamethilen biguanid hidroklorür (4 mgr/gr), arıttıcı ve kireç çözücü ajanlar içerir.

### Fiziksel Veri

Renk: Açık sarı

Koku: Hafif kokulu

pH değeri: 2.0 (konsantre)

Raf ömrü: Konsantre 3 yıl

Kullanılmış seyrelti 7 gün

Ambalaj: Geri dönüşümlü HDPE malzemeden üretilmiştir

### Ambalaj Bilgisi

1kg	1 Lt	2,5 Lt	5 Lt
	✓		✓

### Aksesuarlar

Vacucid® Systematic (424051)



(424051)



**ECOEngage**  
Our Ecological Engagement



**USF Healthcare**  
Unident • Steridine • Farmec

**UNIDENT**  
SWISS